

Οδηγίες χρήσης μάσκας

EN 149: 2001+A1:2009
REGULATION (EU) 2016/425

FACE MASK

FFP2 NR

Style No.:KK-9501

CE 0598

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 για μέσα ατομικής προστασίας και πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 149:2001+A1:2009.

Ελέγξτε πριν τη χρήση:

Η αναπνευστική συσκευή πρέπει να επιλεγεί σωστά πριν από την προβλεπόμενη εφαρμογή. Θα πρέπει να γίνει μεμονωμένη αξιολόγηση εκτίμησης κινδύνου. Ελέγξτε ότι η αναπνευστική συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά και είναι χωρίς ορατά ελαττώματα. Ελέγξτε ότι δεν έχει παρέλθει ημερομηνία λήξης (βλέπε συσκευασία). Ελέγξτε ότι η κατηγορία προστασίας FFP2 NR είναι κατάλληλη για το προϊόν που χρησιμοποιείται και τη συγκέντρωσή του. Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα εάν υπάρχει ελάττωμα ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.

Προοριζόμενη χρήση του ΜΑΠ:

Αυτές οι συσκευές είναι σχεδιασμένες να προστατεύουν ενάντια σε στερεά και υγρά αερολύματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανίες όπως κλωστοϋφαντουργίες, σφαιγεία, μεταλλουργίες, κατασκευές, βιομηχανίες σιδήρου και χάλυβα κ.λπ. Για προστασία από σκόνες, ομίχλη και αναθυμιάσεις που περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο, πηλό, καολίνη, κυτταρίνη, βαμβάκι, αλεύρι, σιδηρούχα μέταλλα, φυτικά έλαια και ορυκτέλαια, υγρά επεξεργασίας μετάλλων.

Το προϊόν αυτό σχεδιάστηκε να προστατεύει ενάντια στους κινδύνους:

Κίνδυνος	Πρότυπο Ενότητας	Μέθοδος αξιολόγησης
Διείσδυση σωματιδίων	EN 149:2001+A1:2009, ενότητα 7.9.1 και 7.9.2	Ολική δοκιμή διαρροής, Διείσδυση υλικού φίλτρου

Εφαρμογή/ Περιορισμοί:


Η αναπνευστική συσκευή είναι κατάλληλη να προστατεύει ενάντια σε μη τοξικά στερεά και υγρά αερολύματα. Μην την χρησιμοποιείτε πέρα από την χρήση που ορίζεται στις προειδοποιήσεις. Η μη σωστή χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη στην υγεία ή θάνατο.

FFP2 NR:

Απόδοση φίλτρου 94%. Ο Καταναμμένος Συντελεστής Προστασίας (FPA) είναι 10. Παραδείγματα εφαρμογών είναι το τρίψιμο σε μαλακό ξύλο, σύνθετα υλικά, σκουριά, στόκος, γύψος, πλαστικά / κοπές, αποξήρανση, άλεση, διάτρηση μετάλλων.

Επεξήγηση σήμανσης:

Σήμανση	Περιγραφή στην ετικέτα	Επεξήγηση
KK-9501 EN 149: 2001+A1:2009 FFP2 NR CE 0598	KK-9501	Σήμανση αναγνώρισης, Αρ. μοντέλου
	EN 149:2001+A1:2009	Αριθμός Ευρωπαϊκού Προτύπου
	FFP2 NR	Ταξινόμηση φίλτρου Απόδοση 94%, μη επαναχρησιμοποιήσιμη
	CE0598	Σήμα CE και αρ. κοινοποιημένου οργανισμού

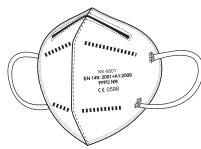

Warnings



- Η μη τήρηση όλων των οδηγιών και των περιορισμών σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ή η αδυναμία σωστής εφαρμογής, μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη στην υγεία ή το θάνατό σας ή δεν θα παρέχει το αναμενόμενο επίπεδο προστασίας.
- Αυτό το προϊόν δεν παρέχει οξυγόνο. Χρησιμοποιήστε μόνο σε επαρκώς αεριζόμενους χώρους που περιέχουν αρκετό οξυγόνο. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την αναπνευστική συσκευή όταν η συγκέντρωση οξυγόνου είναι μικρότερη από 19,5%.
- Μην το χρησιμοποιείτε όταν οι συγκεντρώσεις ρύπων είναι άμεσα επικίνδυνες για την υγεία ή τη ζωή. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε χώρο με κίνδυνο έκρηξης.
- Τα μαλλιά του προσώπου, τα γένια και ορισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα αυτής της αναπνευστικής συσκευής.
- "NR" σημαίνει μη επαναχρησιμοποιήσιμο, αυτή η μάσκα προσώπου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερες από μία βάρδιες. Το χρονικό διάστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η αναπνευστική συσκευή εξαρτάται από τους ρύπους που υπάρχουν αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία βάρδια. Η αναπνευστική συσκευή θα πρέπει να αντικατασταθεί νωρίτερα εάν η αναπνοή γίνει δύσκολη.
- Η αναπνευστική συσκευή πρέπει να απορριφθεί μετά τη χρήση ή όταν καταστραφεί ή παραμορφωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν σχηματίζει πλέον αποτελεσματική σφράγιση στο πρόσωπο, γίνεται υγρή ή εμφανώς βρώμικη, η αναπνοή γίνεται δύσκολη.
- Οι αναπνευστικές συσκευές πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία και να προστατεύονται από τη θερμοκρασία αποθήκευσης και την υγρασία, όπως προτείνει ο κατασκευαστής.

Use steps



ΒΗΜΑ 1: Τοποθετήστε τα δάχτυλα μέσα στη μάσκα προσώπου για να σχηματίσετε το σχήμα της μύτης.

ΒΗΜΑ 2: Κρατήστε τη μάσκα πάνω από τη μύτη και το στόμα, τραβήξτε το λάστιχο πίσω από τα αυτιά.

ΒΗΜΑ 3: Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια, σχηματίστε το ρινικό έλασμα γύρω από τη μύτη και προσαρμόστε τα λάστιχα για να εξασφαλίσετε σωστή εφαρμογή.

ΒΗΜΑ 4: Έλεγχος καλής εφαρμογής


ΒΗΜΑ 5: Αλλάξτε αμέσως τη μάσκα προσώπου εάν η αναπνοή γίνει δύσκολη ή η μάσκα προσώπου καταστραφεί ή παραμορφωθεί.

ΒΗΜΑ 6: Αλλάξτε τη μάσκα προσώπου εάν δεν είναι δυνατή η σωστή εφαρμογή στο πρόσωπο.

ΒΗΜΑ 7: Η προσεκτική τήρηση αυτών των οδηγιών είναι ένα σημαντικό βήμα για την ασφαλή χρήση της αναπνευστικής συσκευής.



Μέγιστη σχετική υγρασία των συνθηκών αποθήκευσης

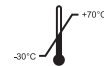

Το εύρος θερμοκρασίας των συνθηκών αποθήκευσης



Δείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή

Εξέταση τύπου ΕΕ για τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 με αριθμό κοινοποιημένου οργανισμού: 0598
SGS Fimko Oy, Takomitie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.

Manufacturer:
Zhejiang Kekang Medical Technology Co., Ltd.
Production Address: South Village, Hongqiao Town, Yueqing City, Zhejiang, China (Inside Yueqing Science & Technology Incubation Innovation Service Center)
Tel: +86-577-61385788 Fax: +86-577-61385017
E-mail: cassie@kkingmed.com
www.kkmed.cn

MADE IN CHINA

